

## 取り扱い説明書

この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この説明書は安全なご使用とマスクの捕集性能を得るための重要な事項です。

必ず正しい使用方法と取り扱い方法を守り安全に留意しお使い下さい。

スキダチはお使いのプリーツマスクの気密を向上させマスクのフィルターを通る外気の比率を向上させるアシストフレーム（補助具）です

スキダチは正しい扱いの基でお客様の持つ使用環境下でのマスクの補修効率の向上を助け塵埃、異物の取り込みを抑えます。

## 警告

本製品はスポーツ等体を大きく動かす状況での使用は第三者にスキダチが当たり怪我をさせる、あるいは自身が怪我をする

恐れがありますのでそのような環境でのご使用は避けてください。

回転物、作動中の機械、ドア、また自身の移動速度などに起因してスキダチ本体、スキダチ装着ストリング、使用中のマスクが突起物に引っかかる、

あるいは機械等に巻き込まれる事により、転倒、転落、機械に挟まれる等、身体的に危険が発生する可能性があります。

人混みでの使用は衝突により使用者あるいは第三者に危険を及ぼす恐れがあります。

上記のご使用なさる条件に注意し使用する周囲の環境に配慮し安全に心掛けご使用ください。

スキダチの調整は一切工具を使わず手で調整してください

工具を使って曲げた場合一部が鋭角的な角度の曲がりとなり破断を誘発する可能性があります。

工具がコーティングを傷つけ保護コーティングの剥離を誘発します

調整は必ず手で行ってください。

スキダチは調整可能ですが一旦使用者ご自身に合わせたスキダチを再度他者に合わせ直す等、繰り返しの曲げ直しは厳禁です。

繰り返しの曲げ直しは内部の金属に疲労を与え破損する危険性があります。

必ず御一人一つを調整して使用し共用など曲げ直しが必要な使用法は避けてください。

一旦調整したら形状を保ち使用する際に隙間が無い様最低限の微調整を加える範囲でご使用ください

運搬と保管時に一旦調整したスキダチの形が変形しないよう箱に入れて保管する、

あるいは吊り下げる等変形を起こさないよう保管してください。

折り畳み、重ね置き、曲げ戻しての保管は厳禁です。

誤って踏み潰すあるいは上に座る等により大きな変形を受けた場合に基の形に曲げ伸ばしでの使用は

事故につながりますので厳禁です

上記の事項を守らない場合破損から生じ事故により失明、怪我等の重大な傷害を負う危険性があります。

使用者適合年齢は基本 18 歳以上とし就労可能な最低年齢者の使用に関しては雇用、職場責任者の管理下で本品の取り扱い説明に

準拠した使用を行ってください。

家庭内の 16 歳以上の年齢の利用者は成人保護者の管理責任の基で、取り扱い説明に準拠した使用管理を行ってください。

年齢が達していた場合でも保護者を必要とする方のご使用は厳禁です

#### 厳守

##### 使用前の点検

スキダチのフレームの内部は金属、外側に PVC コーティングが施してあります。

内部の金属に想定以上の疲労が重なり破断した場合は PVC コーティングの上から線路上に破断面が現れます。

その場合はスキダチ本体の反発力が一部失われその部分が小さな角度で曲がりやすくなります。

点検でそのような現象が生じた場合は破断による事故の恐れがありますので直ちにご使用を停止して下さい。

そのままお使いになった場合軽度な力でも金属がコーティングを破り顔面、目などに刺さり失明など重大な事故に

至る恐れがありますので必ず使用前点検を行ってください。

前回の使用時と装着感が異なった場合は再度点検を実施し損傷が無いかご確認下さい。

##### 注意

スキダチ及びストリングが使用者の髪に絡む恐れが無い様、装着時は髪を束ねる、抑える、帽子の着用をするなど

の注意を払いご使用ください。

スキダチご使用の際口鼻、及び肌にストリング空間形成アダプターが口鼻、又肌に触れた箇所

かゆみ・かぶれ・湿疹などの異常がある場合、または異常が表れた場合は速やかに使用を中

止し、皮膚科の医師の診察を受けてください

スキダチはプリーツタイプマスクの上から押さえマスクのフィルターを通らずに侵入する外気を少なくするマスクの気密向上用具です  
したがって単独での使用、またカップ型マスク、立体化されたマスク、等との使用はできません。

## 使用効果

捕集効果はご使用になるプリーツマスクの性能により異なります。  
スキダチはご使用になるプリーツマスクのそれぞれの捕集性能表示でなく  
そのプリーツマスクを実際に装着したテストとそのプリーツマスクにスキダチと  
空間形成アダプターを併用した比較テストに於いて、スキダチ使用の場合の捕集性能向上  
効果を確認しています。  
ただし公的機関での試験と規格の認定はされていません。  
スキダチはご使用なさるマスクのフィルター自体の捕集性を高める物でなく  
マスクフィルターを通さずに侵入する外気を抑えフィルターを通る外気比率を向上させる  
ことにより総合的な捕集効率の向上を図る器具です。

又スキダチは装着者それぞれのお顔に合わせ調整が可能ですが、調整が著しく不適切な場合は、お使いになるマスクの補修効率向上効果が出ない場合があります。  
スキダチの気密能力の向上に関わる調整は、調整の手引きをご覧になり適切な調整を行い  
その効果を引き出してください。

使用するプリーツマスクは幅175mm以上の物をご使用ください  
スキダチにプリーツマスクをセットし空間を作るアダプターを挿入した際に  
スキダチのフレーム外周から外にプリーツマスクが残るように  
ご使用下さい。フレームがプリーツマスクの全周囲を押さえなかった場合  
隙間が出来てスキダチが機能せず捕集効果の向上が得られません

## 取り扱い禁止事項

### 厳禁事項

摂氏-10度以下 50度以上での保管と使用

スキダチのコーティング素材 PVC の性質上低温では脆くなり、高温では溶ける恐れがあります。

有機溶剤での洗浄、清掃 コーティングが溶ける恐れがあります  
取り扱いの際は有機溶剤が手に残らないよう手をよく洗ってご使用ください。

樹脂を痛める紫外線滅菌装置の使用、電子レンジでの乾燥等の殺菌、熱湯消毒等  
PVC 樹脂及び金属に損傷を及ぼす不適切な殺菌と取扱いは厳禁です。

スキダチのお手入れ

清掃と消毒

スキダチ 通常の使用では中性洗剤でのふき取り  
有機溶剤の使用は厳禁です

本体

殺菌を行う際は市販の次亜塩素酸ナトリウム系消毒液でふき取ってください  
漂白剤等を使用する場合は濃度が違うため使用する商品（銘柄）に適合した率で  
希釈を行い使用して下さい。

アダプター、水ぬるま湯での洗浄 アルコール消毒か次亜塩素酸ナトリウム系消毒液での  
殺菌（熱湯消毒は不可）  
ストリング、金属があるため洗浄は避けアルコール消毒液、次亜塩素酸ナトリウム系消毒液  
をご使用ください。

廃棄する場合

スキダチ本体は PVC コーティングの中に金属のフレームが入っています。  
カッター等を使い PVC コーティングを剥がし金属と可燃物に分け廃棄してください  
付属品の廃棄にあたっては各自治体の指導条例に合わせ廃棄をお願いします

